


## COMO UTILIZAR CORRETAMENTE O SEU PRESERVATIVO PRESERV® ALTA PROTEÇÃO

Preserv® Alta Proteção foi desenvolvido com a finalidade de evitar o contato direto entre os órgãos genitais e entre o esperma e a vagina. O Agente Espermicida Nonoxinol 9, cuja ação imobiliza os espermatozoides, oferece uma segunda barreira de proteção contra a gravidez, mesmo que o preservativo se rompa, por uso incorreto e proporciona uma relação sexual com mais conforto, o que dá maior segurança e confiabilidade, sem diminuir o prazer. Seu USO CORRETO revela-se excelente método anticoncepcional, que permite o planejamento familiar; além disso, reduz significativamente o contágio das doenças sexualmente transmissíveis (DST) como AIDS, sífilis, blenorragia e outras.

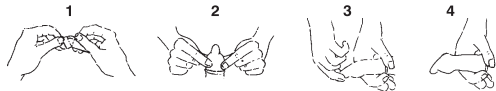

**MODO DE USAR (veja a ilustração):** **1** - Abra o envelope sempre pelo picote, que está na parte inferior. Não abra o envelope com objetos afiados ou pontiagudos (unhas ou dentes). Retire o preservativo do envelope somente na hora do uso. **2** - Coloque o preservativo pela ponta do pênis ereto, porém não o faça com as unhas. **3** - Comprima a ponta do preservativo, entre o polegar e o indicador, a fim de que não permaneça ar no reservatório. **4** - Desenrole o preservativo

sobre o pênis até o fim observando o lado certo. **IMPORTANTE:** • Antes de abrir a embalagem, verifique o prazo de validade. • Após a ejaculação, retire o pênis ainda ereto da vagina, com cuidado, segurando o preservativo pela bainha (anel de látex), para que o mesmo não escape e cause vazamentos. • Depois da retirada, evite que o pênis ou o próprio preservativo entre em contato com a vagina. • Cada preservativo deve ser usado apenas UMA vez. • Guarde-os em lugar seco e arejado, longe do sol e do calor. • Não teste o preservativo, pois existe o risco de danificá-lo. • Sempre coloque o preservativo antes de qualquer contato do pênis com a vagina, pois frequentemente ocorre uma emissão prematura de esperma. • Nunca jogue preservativos no vaso sanitário. • Em caso de reação alérgica, suspenda o uso do produto e procure orientação médica. • **Não utilize o preservativo com pomadas medicinais, cremes hidratantes, loções para bebês, vaselina ou outros lubrificantes à base de óleo mineral (petróleo) ou vegetal; eles danificam qualquer preservativo de látex em poucos minutos.** Para escolha do método contraceptivo a ser adotado, consulte o seu médico. Lembre-se que "nenhum método contraceptivo é absolutamente eficiente; ISTO, ENTRETANTO, NÃO DIMINUI EM NADA A IMPORTÂNCIA DO PRESERVATIVO QUANDO USADO CORRETAMENTE". Lote, Fabricação e Validade, no verso da embalagem. Se adquirir este produto com o prazo vencido, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo nº 0800-701-6399 ou mande um e-mail para [sac@preserv.com.br](mailto:sac@preserv.com.br)